


Jouw 5 momenten van handhygiëne

Focus op de zorg voor een patiënt met een centrale veneuze katheter

Onmiddellijk voor elke handeling met de katheter en het bijbehorende systeem voor de intraveneuze toediening van medicatie, zoals:

- 2a. Het inbrengen van de katheter (voor u steriele handschoenen aantrekt), het verwijderen van de katheter (voor u schone, niet-steriele handschoenen aantrekt), het vervangen van een verband, het nemen van bloed of het klaarmaken van het nodige materiaal voor die procedures
- 2b. Het openen van de toedieningsset en het infuussysteem
- 2c. Het voorbereiden van de medicatie voor infusie in de katheter

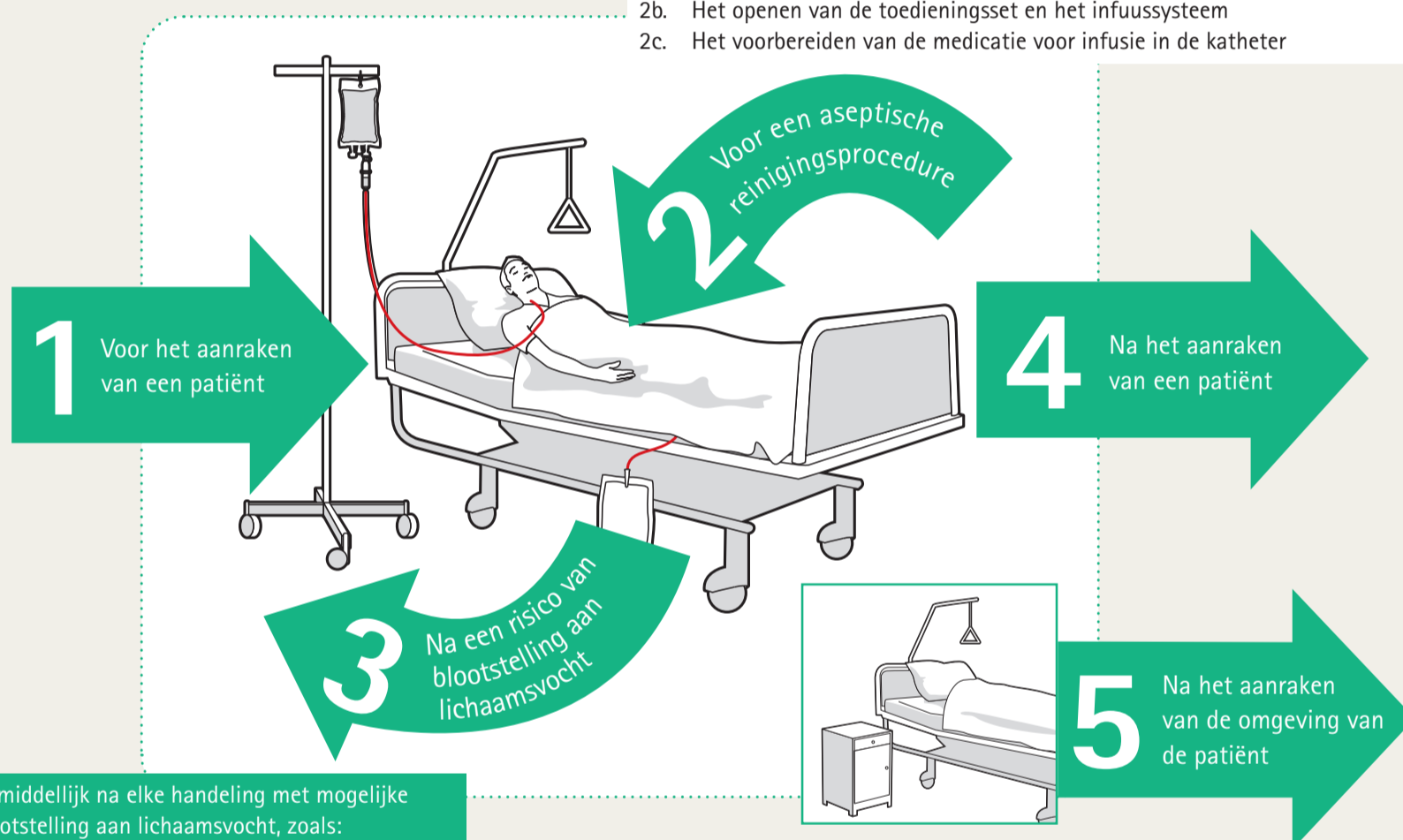

Onmiddellijk na elke handeling met mogelijke blootstelling aan lichaamsvocht, zoals:

- 3a. Het inbrengen of verwijderen van de katheter
- 3b. Het nemen van bloed uit de katheter

*Gebaseerd op de 'WHO hand hygiene improvement approach' posters, URL: http://www.who.int/entity/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2015/en/index.html
© Wereldgezondheidsorganisatie 2015. Alle rechten voorbehouden.

Belangrijke extra aandachtspunten voor centrale intraveneuze katheters

1. **Indicatie:** Verzekert dat een centrale intraveneuze katheter geïndiceerd is. Verwijder de katheter wanneer deze niet langer nodig/klinisch geïndiceerd is.
2. **Aanbrengen/onderhouden/verwijderen**
 - 2.1 Breng geen katheter in de femorale ader in.
 - 2.2 Bereid de schone huid voor met een antisepticum (bij voorkeur 2% chloorhexidinegluconaat op alcoholbasis) voor je de katheter inbrengt.
 - 2.3 Gebruik tijdens het inbrengen volledige steriele barrièrevoorzorgen (operatiemuts, steriele handschoenen, steriele schort, groot steriel laken).
 - 2.4 Vervang gaasverband om de 2 dagen en transparant verband om de 7 dagen, en telkens als het zichtbaar vuil is.
 - 2.5 Vervang de slangen voor de toediening van bloed, bloedproducten, chemotherapie en vetemulsies binnen 24 uur na het begin van het infuus. Overweeg alle andere slangen om de 96 uur te vervangen.
- 2.6 Gebruik een aseptische procedure (met techniek zonder aanraking) voor alle handelingen met katheters.
- 2.7 'Scrub the hub' gedurende ten minste 15 seconden met chloorhexidinegluconaat op alcoholbasis.
3. **Monitoring:** Noteer de tijd en datum van het inbrengen van de katheter, het verwijderen, het vervangen van het verband en de toestand (visuele aanblik) van de huid op de kathetersite elke dag.

