



Open de beschermkap. Vouw indien nodig de beschermlaag een beetje open.



Verwijder het dopje van de vulpoort.



Sluit de open/dicht klem en sluit de gevulde luer lock spuit aan op de vulpoort.



Druk de spuit leeg en herhaal stap 3 en 4 totdat Easypump® II helemaal gevuld is.




Verwijder de spuit.



Draai het dopje weer op de vulpoort.



Sluit de beschermkap.

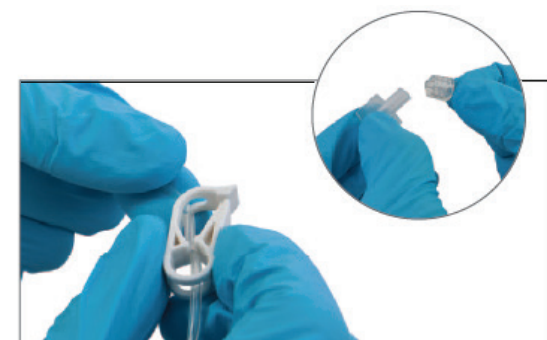

Ontlucht de lijn eventueel door de open/dicht klem te openen en het dopje aan het einde van de slang even los te draaien. Sluit de klem weer bij de eerste druppel en draai het dopje weer vast.