



Multi-ad® transfer set
Art.nr. 513548



Easypump® II



Ecoflac® Plus



Omnifix® Luer-lock



Prik de spike in de infuuscontainer met opgelost medicijn.



Aan het uiteinde van het systeem bevindt zich een connector waaraan een luer lock spuit gekoppeld kan worden



Trek met de spuit de benodigde vloeistof op uit de infuuscontainer. Verwijder de lucht door de spuit leeg te drukken en trek de benodigde vloeistof verder op.



Sluit de open/dicht klem van Easypump® II. Sluit daarna Easypump® II aan op de andere connector. Druk de spuit leeg. De terugslagklep zorgt ervoor dat de vloeistof richting Easypump® II gaat en niet terug de container in.



De laatste twee stappen kunnen herhaald worden zonder alles los te koppelen. Bij elke nieuwe Easypump® II die gevuld moet worden, hoeft alleen de Easypump® II losgekoppeld te worden en een nieuwe aangekoppeld.