



Softima® Active O' convex is een oplossing voor stomadragers die last hebben van lekkages. Door een lekkage kan huidirritatie ontstaan. De huidbeschermer in deze convex huidplaat is zachter dan de andere convex huidplaten.⁴

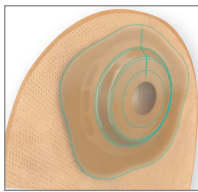



6 mm zachte ring

Een 6 mm zachte ring die naadloos aansluit om een optimale afdichting rond de stoma te garanderen.⁴

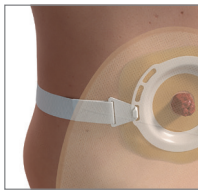

B. Braun stomagordel

Een stomagordel kan worden gebruikt om het convex-effect te versterken.^{3,4} Softima® Active O' convex heeft aan beide zijden drie gordeloojjes om de gordel aan vast te haken.

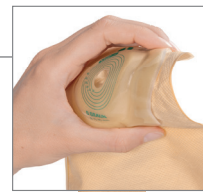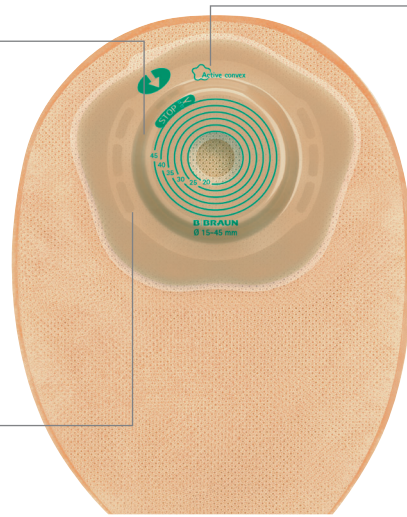

Huidbeschermer met zachte convexiteit

De zachte en flexibele convex huidplaat oefent door de bolling een lichte druk uit rondom de stoma waardoor de stoma in het zakje wordt gedrukt en de kans op lekkage vermindert.

Softima® Active O' convex stomazakjes zijn verkrijgbaar voor colo, ileo en urinestomadragers.



High Flow ileo opvangzak

- Extra groot formaat.
- Brede uitloop diameter van 14 mm met een handige dopsluiting.
- Eenvoudig en veilig aan te sluiten op de Flow collector.



Uro aftapkraan

- De voordelen overdag

- Kraantje met duidelijke voelbare open-dichtpositie versterkt met een klik.
- Eenvoudig te bedienen en druppelt niet na.



Roll'up uitloop

- Geïntegreerde klittenband sluiting.
- Uitloopopening van 7 cm breed.
- Zachte randen voor meer comfort.
- Met gesloten uitloop net zo compact als een gesloten zakje.



- De voordelen in de nacht

- Kan worden aangesloten op een nachtzak voor extra capaciteit.
- Verbinding versterkt door een klik.
- Universele connector die meedraait met bewegingen tijdens het slapen.



Iedere stomadrager is uniek. Of je nu oud of jong, dik of dun bent, door verschillende lichaamsvormen hebben veel stomadragers dezelfde uitdaging: het voorkomen van stomalekkage.

76%

van de stomadragers heeft wel eens last van een lekkage.¹

Een convex huidplaat kan een oplossing zijn

Een convex (bolling) in de stomahuidplaat sluit door de vormgeving van het zachte stomamateriaal beter aan op de peristomale huid, waardoor een lekkage wordt voorkomen.¹

Convex stomamateriaal is geschikt voor:

- een stoma op huidniveau¹
- een teruggetrokken stoma, onder huidniveau¹
- een stoma met rondom huidplooiën, vouwen of kuiltjes¹
- zachte loszittende huid²
- stoma's met high output²

Voordelen van Soft convex

Zachte convexproducten sluiten goed aan rond de stoma en de huidplaat behoudt flexibiliteit bij bewegen en vooroverbuigen. Dit zorgt voor een veilig gevoel^{2,3}, bescherming van de huid², draagcomfort en vertrouwen³.

Bestelinformatie

Softima® Active O'convex gesloten zakjes – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 690 ml	4612716K	17266521	⌘ 15-45	⊖

⌘ Uitknipbaar | ⊖ Split Cover

Softima® Active O'convex High Flow – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
± 920 ml	4632716K	17266580	⌘ 15-45	⊖

⌘ Uitknipbaar | ⊖ Split Cover

Softima® Active O'convex Roll'Up – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 600 ml	4622716K	17133750	⌘ 15-45	⊖
Maxi ± 690 ml	4622717K	17133742	⌘ 15-45	⊖
	4622715K	17266572	⌘ 15-35	⊖

⌘ Uitknipbaar | ⊖ Split Cover

Softima® Active O'convex Uro – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 670 ml	4641715K	17133769	⌘ 15-35	○
	4642715K	17266548	⌘ 15-35	⊖
	4642725K	17266556	25	⊖
	4642730K	17266564	30	⊖

⌘ Uitknipbaar | ○ Transparant | ⊖ Split Cover

Referenties:

- 1 Evans, M & White, P. Selecting convexity to improve and maintain peristomal skin integrity. Br J Nurs. 2020 Sep 0;29(16):S8-S14. doi: 10.12968/bjon.2020.29.16.S8.
- 2 Perrin, A. Convex stoma appliances: an audit of stoma care nurses. Br J Nurs, 2016 Dec 8 ;25(22):S10-S15. doi: 10.12968/bjon.2016.25.22.S10.
- 3 Hoeflok J, Salvadlena G, Pridham S, Droste W, McNichol L, Gray M. Use of Convexity in Ostomy Care. Results of an International Consensus Meeting. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017;44(1):55-62. doi: 10.1097/WON.0000000000000291.
- 4 Data on file: Clinical evaluation report: CER-OC-03 Ostomy appliances; V3; 2021-03-09.
- 5 Data on file: R&D Report N° CR1479 Evaluation of the flexibility of 1-Piece Convex systems; BB4DEV35 CR1479 Eval Souplesse PCT Convex Concurrentsrevue CGA-EN; V1; 2022-05-10.
- 6 Data on file: Report on Flexima®/Softima® Key post-marketing user evaluation. Lukas Schaumann. 2005-03-23.

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.