

Infusieduur en vulvolume

	ST 100-0,5	ST 250-0,5	ST 50-1	ST 100-1	ST 250-1	ST 250-1,5	ST 400-2	ST 500-2	ST 100-2	ST 400-4
Infusieduur (uur/dag)	Vulvolume (ml)									
00:15 u	50	125								
00:30 u	100	250		50						
00:45 u			38	75	188					
01:00 u			50	100	250	175		250	50	
01:15 u			63	125		219		313	63	
01:30 u						263	300	375	75	
01:45 u							350	438	88	
02:00 u							400	500	100	
02:15 u							450		113	
02:30 u							500		125	250
02:45 u							550			275
03:00 u										300
03:30 u										350
04:00 u										400
04:30 u										450
05:00 u										500

Voor het vinden van het juiste vulvolume bij onder- of overvulling van de Easypump® II, kijk in de linker kolom bij de gewenste infusieduur en boven in de tabel voor het gewenste model Easypump® II; het juiste vulvolume kan dan afgelezen worden. Om de gewenste Easypump® II te vinden voor de gewenste infusieduur, kijk dan in de linker kolom voor de gewenste infusieduur en zoek er een passend vulvolume bij; Easypump® II is dan weer boven in de tabel af te lezen.

	LT 60-12	LT 80-16	LT 125-25	LT 270-27	LT 60-30	LT 120-30	LT 400-40	LT 100-50	LT 270-54	LT 120-60	LT 400-80	LT 100-67	LT 270-68	LT 400-100	LT 65-130	LT 270-135	LT 300-150	LT 100-200	LT 270-270	
Infusieduur (uur/dag)	Vulvolume (ml)										Vulvolume (ml)									
8 u	40																			
10 u	50	50																		
12 u	60	60	60																	
18 u		90	90	180	36	72														
1 d 24 u		120	120	240	48	96	240													
30 u					60	120	300	60	150	60										
2 d 48 u							480	96	240	96	240	72								
60 u								120		120	300	90	240	240	30					
3 d 72 u											360	108	288	288	36	144				
4 d 96 u											480			384	48	192	192			
5 d 120 u														480	60	240	240	60		
6 d 144 u																288	288	72	144	
7 d 168 u																	336	84	168	
8 d 192 u																		96	192	
9 d 216 u																		108	216	
10 d 240 u																		120	240	
11 d 264 u																			264	
12 d 288 u																			288	