

# Be 1®

## Het slimme 'dekseltje' op je colostoma

NIEUW

Be 1® is een opgevouwen stomazakje in een gesloten platte capsule. In plaats van een stomazakje op het lichaam zit er nu een 'dekseltje' op een huidplaat wat de ontlasting en de geur ervan in het lichaam houdt. Dat betekent dus geen ontlasting in het stomazakje tegen het lichaam en geen geur en geluid van ontlasting of gas. Want wat er niet is kun je ook niet horen, voelen of ruiken.



### Hoe werkt het?


De Be 1® capsule is onderdeel van een 2-delig systeem en past op een Softima® 3S huidplaat. Als er ontlasting of gasvorming opkomt, voelt de colostomadrager het deksel opbollen. Dit geeft tijd om naar het toilet te gaan en het gas te laten ontsnappen of de ontlasting te laten komen. Daarna wordt een nieuwe Be 1® geplaatst. Zo is er weer controle over de stoelgang.

### Veilig systeem

Met automatische of handmatige opening zodra er ontlasting komt.

### Geleidingssysteem

Voor het eenvoudig aanbrengen van de capsule in de gewenste positie.

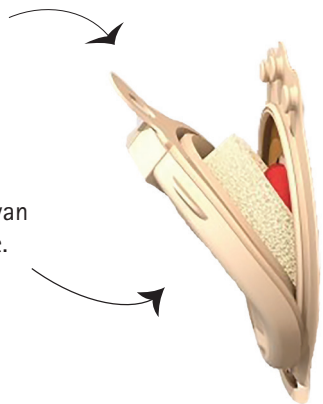

### Gecontroleerd ontlichten

Voor actief ontlichten bij verhoogde druk in de buik.

### Schoon


Een foamring maakt het schoonmaken van de huidplaat gemakkelijker.

### Discreet

Gesloten opvangzakje opgevouwen in een soepele plastic capsule.

### Softima® 3S Be 1® huidplaat – 5 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø stoma	Ø (mm)
936517K	16783271	< 30 mm	55 ✂
936617K	16783298	30 – 40 mm	65 ✂

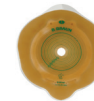

### Be 1® capsule – 30 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø	Inhoud
9350355K	16783301	55 mm	± 615 ml
9350365K	16783255	65 mm	± 635 ml



### Colozakjes Softima® 3S – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø	Kleur
Mini ±230 ml	931255K	15997340	55 mm	●
Midi ±500 ml	931055K	15997316	55 mm	●
Midi ±465 ml	931065K	15997324	55 mm	●
Maxi ±655 ml	931455K	15997286	65 mm	●
Maxi ±630 ml	931465K	15997294	65 mm	●

