



Instructiekaart Eso-SPONGE®

Endoluminale vacuümtherapie voor upper GI


PLAATSEN VAN Eso-SPONGE®

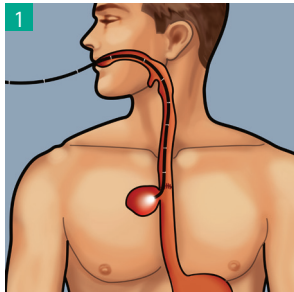


De endoscopist zorgt dat het einde van de holte zichtbaar is en trekt de endoscoop terug tot aan de ingang van de holte. De markering aan het einde van de endoscoop toont de lengte in stappen van 5 cm.

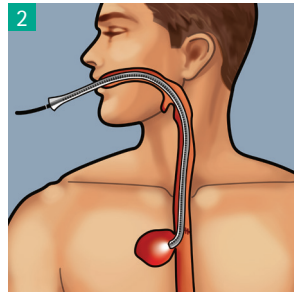


Breng d.m.v. visuele controle de tube in de insufficiënte holte. De gastroscoop kan als hulpmiddel worden gebruikt om hier te komen.

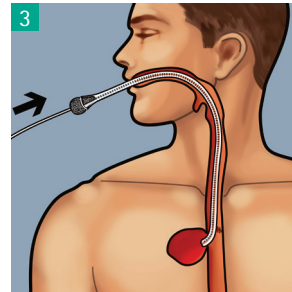


Hydrogel kan worden gebruikt om Eso-SPONGE® te doorweken.

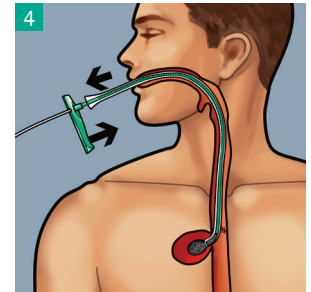


Druk met de pusher Eso-SPONGE® in de tube totdat de zwarte lijn zichtbaar is aan het begin van de tube. Nu is de spons bij het uiteinde van de tube.

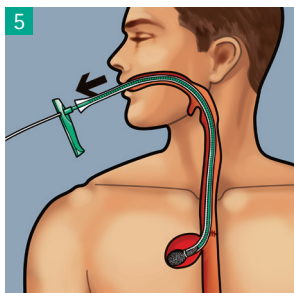


Trek de pusher iets terug, houd de pusher op zijn plek en trek de tube richting het handvat van de pusher. Eso-SPONGE® vult vervolgens de holte. Schuif de tube en de pusher gelijktijdig uit de slokdarm.

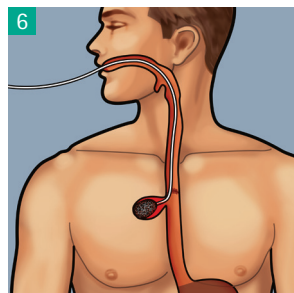


Controleer de positie van Eso-SPONGE® met een endoscoop en pas eventueel de positie aan met behulp van een endoscopische tang.

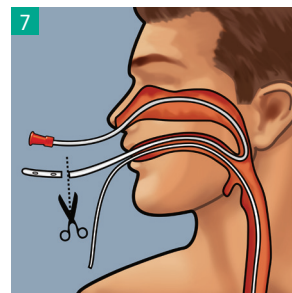


Transnasale verbinding: Breng de maagsonde CH 16 (deze zit niet in de verpakking) in via de neus en breng deze tube naar buiten via de mond. Knip het atraumatische puntje eraf.

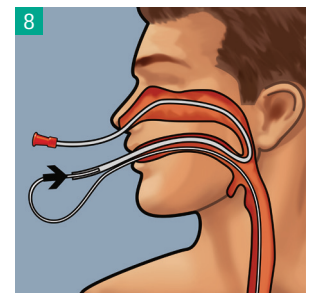



Verbind de drain met de sonde aan de voorkant van de mond. Trek de sonde samen met de drain terug via de neus.

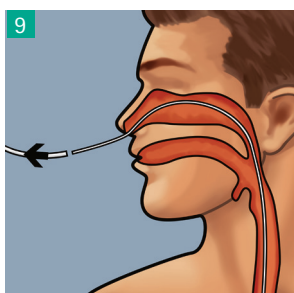

De drain is nu transnasaal aangelegd.

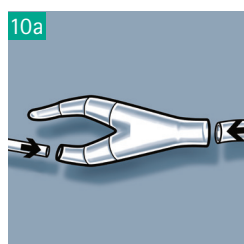

Sluit de drain met behulp van het y-stuk aan de slang van een verstelbare medische pomp. Bij gebruik van de MV1 pomp, knip de klep van de slang af. Verbind de filters met een Luer-lock aan de pomp en bevestig de cilinder slang naar het filter.

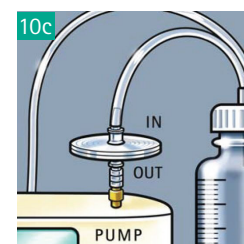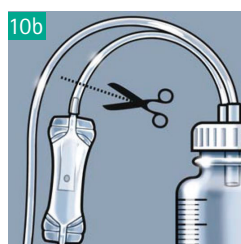

Instructiekaart Eso-SPONGE®

Endoluminale vacuümtherapie voor upper GI

VERWIJDEREN VAN ESO-SPONGE® VIA DE MOND:

1. Koppel Eso-SPONGE® af van de pomp.
2. Pak de drain achteruit de keel en trek voorzichtig de drain via de mond naar buiten. De spons mag nooit via de neus worden verwijderd!
3. Zodra de redondrain op zijn plaats zit, gebruik je de meegeleverde irrigatie set om de wondholte te irrigeren met ongeveer 20 ml oplossing Ringer of NaCl 0,9 %. Gebruik schuifklemmen om de resterende redondrains af te klemmen terwijl de spons verweekt.
4. Eso-SPONGE® via de mond verwijderen:
 - Voorzichtig, doorlopend en met toenemende kracht trekken aan de drainageslang tot de spons vrijkomt uit de holte (wegvallen van weerstand).
 - Na het losmaken van de spons, zacht blijven trekken om de slang via de mond te verwijderen.
5. Controleer of de spons nog onbeschadigd is.
6. Onderzoek de behandelde holte met de endoscoop om te controleren op sponsresten en documenteer het resultaat van de behandeling.
7. Indien je een nieuwe Eso-SPONGE® moet inbrengen, meet dan de grootte van de holte opnieuw om de omvang van de nieuwe spons te bepalen.
8. Verwijder sponsresten met een geschikte endoscopische tang.
9. Om doeltreffende sluiting van de holte te bevorderen, wordt aangeraden om eerst de diameter van de spons te verminderen, zonder de lengte te verminderen, om sluiting van het resterende kanaal in de opeenvolgende behandelingscycli van voor naar achter toe te laten.
10. We bevelen voortdurend gebruik van Eso-SPONGE® aan tot de lengte van de holte verminderd is tot minder dan 2 cm en de diameter tot minder dan 1 cm.

BEHANDELSET

1. Eso-SPONGE®
2. Overtube
3. Pusher
4. Spoelset
5. Sluitklem
6. Y-verbindingstuk



Let op! Redyrob® Trans Plus mag niet worden gebruikt in combinatie met Eso-SPONGE®. De vacuümdruk is te hoog voor deze behandeling.



Richtlijnen vacuümpomp

Voor een optimale behandeling met Eso-SPONGE® adviseren wij een verstelbare medische MV1 pomp voor vacuümbehandeling te gebruiken. Met een aanzuiging van 50 mmHg tot maximaal 125 mmHg.

Regelmatig controleren van het pompsysteem is verplicht

Het systeem moet om de 48-72 uur worden vervangen. Indien nodig kan een nieuwe spons worden geplaatst.

Behandelstappen

Op de voorzijde worden de behandelstappen voor vacuümtherapie met Eso-SPONGE® toegelicht. Deze informatie is een aanvulling op de gebruikershandleiding. Lees voor gebruik eerst de bijsluiter.

BESTELINFORMATIE

Artikelnummer	Omschrijving	Toepassing
5526540	Eso-SPONGE® OV.15 mm	Colonscopie
5526550	Eso-SPONGE® OV.13 mm	Gastroscopie