

Totaal Infectie Preventie Behandelplan met de gouden combinatie

Prontosan® & Askina® Calgitrol®: winnaars in wondgenezing

	Weefsel	Oordeel	Doel	Wondbedvoorbereiding	Productkeuze	Secundair verband	Wisselfrequentie
Tissue	Zwart Necrotisch	Vaste korst	Beschermen	Wondbed- voorbereiding met Prontosan® vloeistof 10-15 minuten bij verbandwissel	Droog verbinden	Askina® SilNet wondcontactlaag absorberend verband	1 x daags
		Korst met ontsteking	Verweken en debrideren Infectie bestrijden Verweken en debrideren		Prontosan® Wondgel X		Askina SilNet wondcontactlaag absorberend verband
		Vervloeid			Prontosan® Wondgel X		
Geel Fibrineus (kans op biofilm vergroet)	Oppervlakkig	Reinigen Biofilm voorkomen Biofilm behandelen	Prontosan® Wondgel X		Askina® SilNet wondcontactlaag absorberend verband of Askina® DresSil Border	Bij dreigende lekkage of verzadiging	
	Diep	Reinigen en debrideren Biofilm voorkomen Biofilm behandelen	Prontosan® Wondgel bij kleine holte Prontosan® Wondgel X bij kleine holte		Askina® SilNet wondcontactlaag absorberend verband	Bij dreigende lekkage of verzadiging	
Rood Grannulerend	Oppervlakkig	Beschermen/bevorderen granulatieweefsel Biofilm voorkomen Biofilm behandelen	Askina® DresSil Border		Geen	Bij dreigende lekkage of verzadiging max. 7 dagen	
	Diep	Beschermen/bevorderen granulatieweefsel Biofilm voorkomen Biofilm behandelen	Askina® foam Cavity	Absorberend verband	Bij dreigende lekkage of verzadiging max. 7 dagen		
Infection	Infectie	Oppervlakkig	Infectie bestrijden	Askina® Calgitrol® Ag foam	Absorberend verband	Bij dreigende lekkage of verzadiging. Geeft >156 uur zilverionen af, dus mag 5 dagen op of in de wond blijven.	
		Diep	Infectie bestrijden	Askina® Calgitrol® pasta bij kleine holte Askina® Calgitrol® Thin bij grote holte	Askina® SilNet en absorberend verband Absorberend verband		
Moisture	Vochtbalans	Droog	Bevochtigen	Askina® Gel	Askina® DresSil Border	2 tot 3 x per week	
		Vochtig Nat Kenmerk van biofilm Overmatig exsudaat vernietigt extracellulaire matrix	Handhaven Absorberen Biofilm voorkomen Biofilm behandelen	Askina® DresSil Border Prontosan® Wondgel X	Absorberend verband	2 tot 3 x per week Bij dreigende lekkage of verzadiging	
Edge	Wondranden	Indien verweekt	Beschermen Wondranden en wond- omgeving reinigen	Askina® Barrier Spray		Elke 2 tot 3 dagen aanbrengen	

Wondinfecties
binnen 2 weken
opgelost met
Askina® Calgitrol®

4 weken snellere
wondgenezing met
Prontosan®