

VULLEN EASYPUMP® II MET MULTI-AD® TRANSFER SET



Multi-ad® transfer set
Art.nr. 513548



Easypump® II



Ecoflac® Plus



Omnifix® Luer Lock



1
Prik de spike in de infuuscontainer met opgelost medicijn.



2
Aan het uiteinde van het systeem bevindt zich een connector waaraan een luer lock spuit gekoppeld kan worden.



3
Trek met de spuit de benodigde vloeistof op uit de infuuscontainer. Verwijder de lucht door de spuit leeg te drukken en trek de benodigde vloeistof verder op.



4
Sluit de open/dicht klem van Easypump® II. Sluit daarna Easypump® II aan op de andere connector. Druk de spuit leeg. De terugslagklep zorgt ervoor dat de vloeistof richting Easypump® II gaat en niet terug de container in.



5
De laatste twee stappen kunnen herhaald worden zonder alles los te koppelen. Bij elke nieuwe Easypump® II die gevuld moet worden, hoeft alleen de Easypump® II losgekoppeld te worden en een nieuwe aangekoppeld.