



Checklist aansluiten


Easypump® II

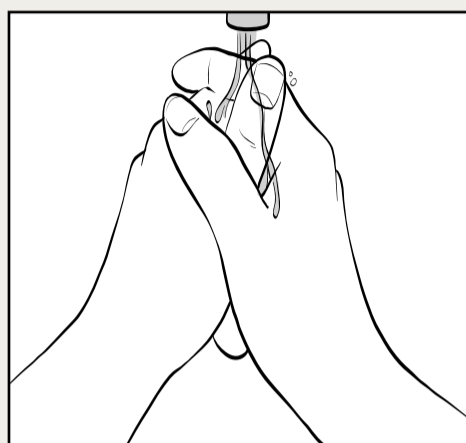


1. Was en desinfecteer je handen volgens voorschrift.

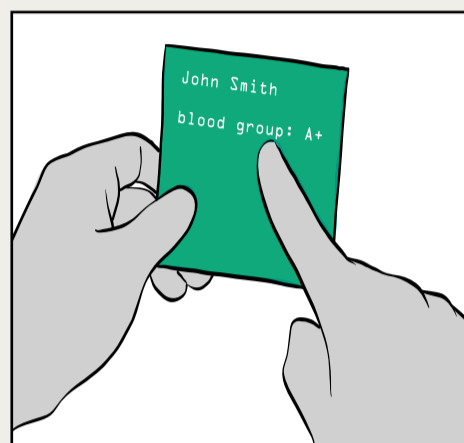


2. Controleer op het etiket de patiëntgegevens, medicatie en houdbaarheid.

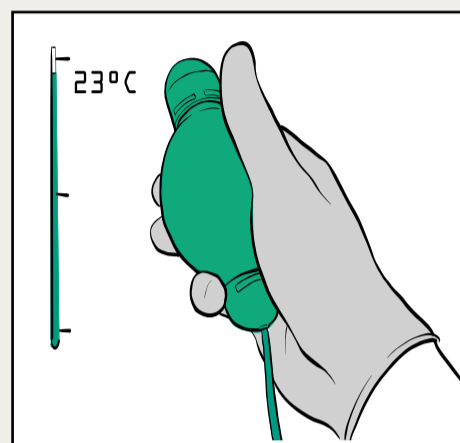

3. Controleer of de pomp op kamertemperatuur is.

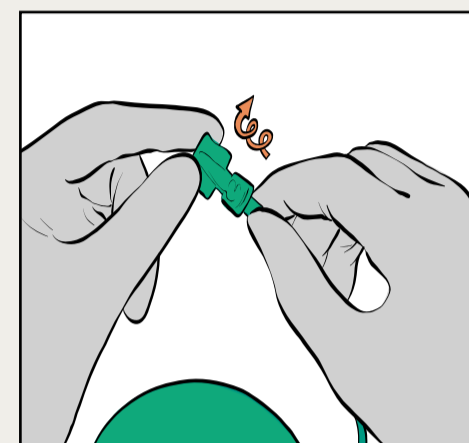


4. Open de afsluitdop aan het einde van de toedienings slang.

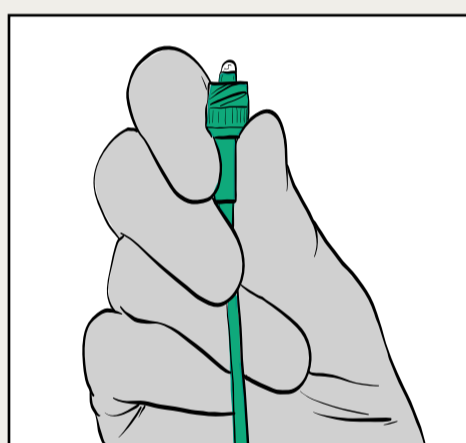


5. Zorg ervoor dat alle lucht uit de lijn is verwijderd en wacht tot je de eerste druppel ziet.




6. Desinfecteer de intraveneuze toegangspoort.

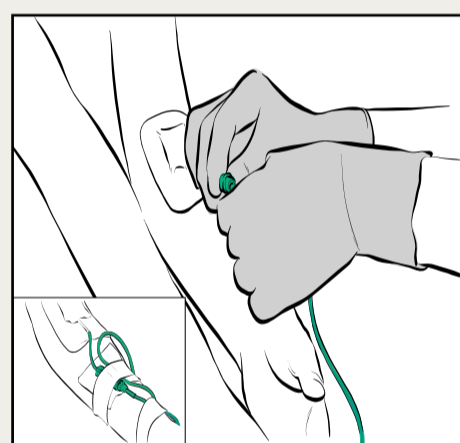


7. Sluit Easypump® II aan op de toegangspoort van de patiënt.

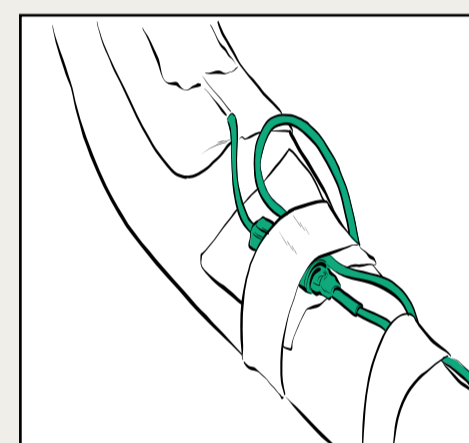

8. Bevestig de flowrestrictor (laatste stukje slang) met tape op de huid.

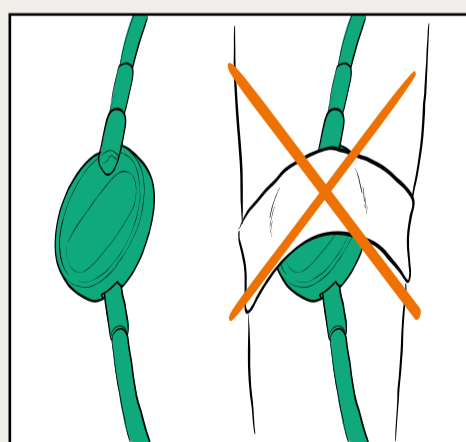

9. Zorg ervoor dat het filter niet afgeplakt wordt en dat de opening zichtbaar is.

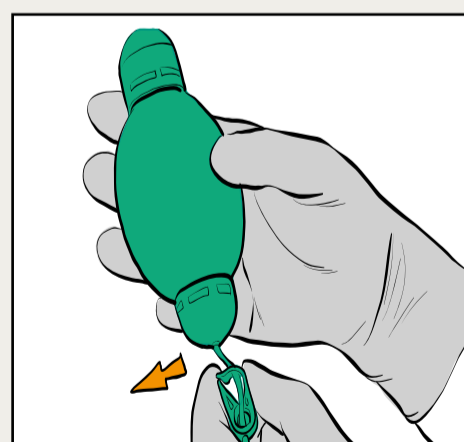

10. Open de klem, de infusie start onmiddellijk.