

Introcan Safety[®] Deep Access

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Voor moeilijk aan te prikken venen




Voorbereiding & pre-scan

- Leg alle items klaar voor het inbrengen en stabiliseren van de IVC.
- Controleer de positie van de patiënt en het toestel. Stem het display van het echografietoestel af op de richting van de canulatie.
- Breng gel aan op de sonde.
- Differentieer de anatomische structuren en bepaal het geschikte aanprikpunt.


Vóór het aanprikken

- Leg een steriel veld klaar.
- Ontsmet het aanprikpunt volgens protocol.
- Bedek de sonde en breng gel aan.
- Zoek de eerder bepaalde vene.

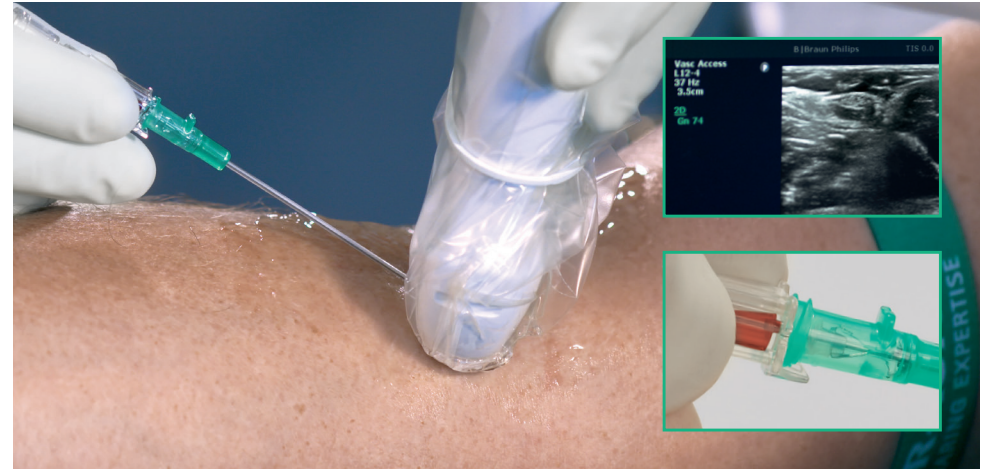

Inbrengen en observeren

- Wijzig de aanprikhoek en steek de naald in de vene.
- Controleer via echografie of de punt van de naald in de vene zit **1**.
- De eerste flashback bevestigt dat de naald in het bloedvat zit **2**.

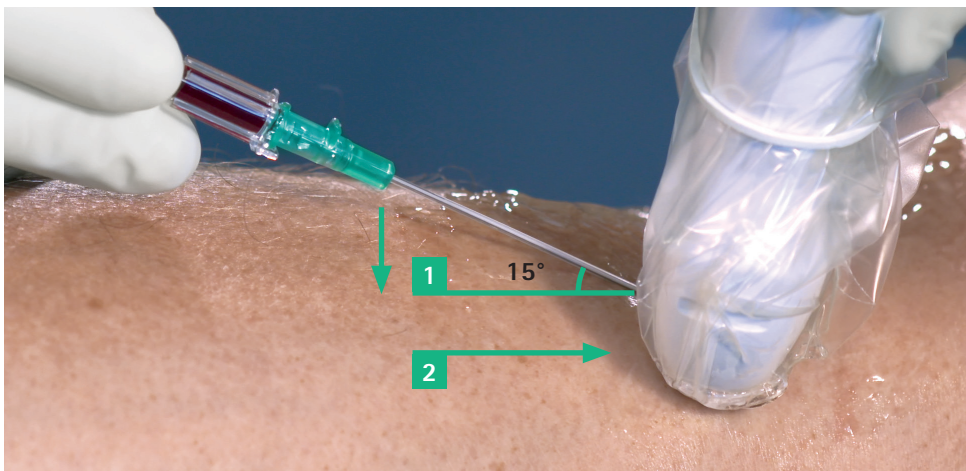


Zakken en iets vooruit bewegen

- Laat de katheter zakken tot een hoek van 15° **1**.
- Breng de katheter en naald iets naar voren om ervoor te zorgen dat de punt van de katheter in de vene zit **2**.



Katheter vooruit bewegen

- Gebruik de gripplaat om de katheter 3 tot 5 mm op te schuiven.
- Observeer de tweede flashback van bloed, zichtbaar tussen naald en katheter. Dit bevestigt dat de katheter in het bloedvat zit.
- Schuif de katheter verder op.

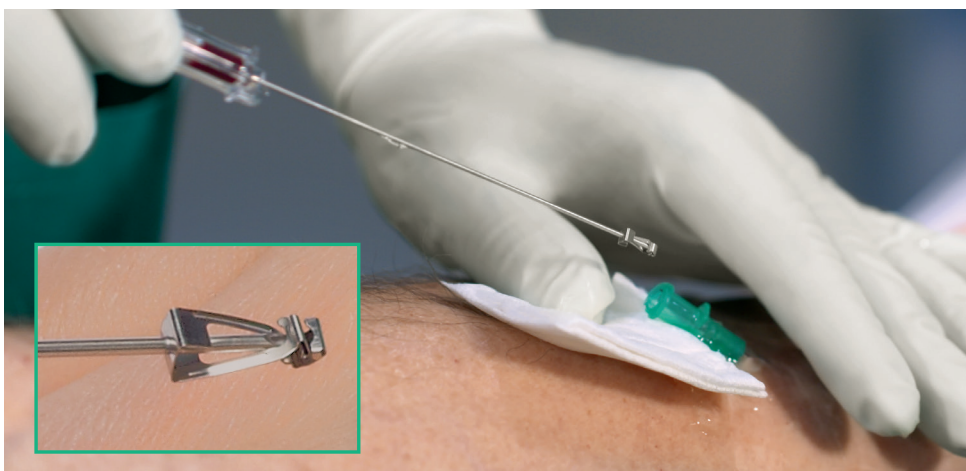

Afsluiten en naald verwijderen

- Leg de echografiesonde neer, zodat je een hand vrij hebt om de vene af te sluiten.
- Trek in één vloeiende beweging de naald uit de hub terwijl je de vene afdrukt. Het veiligheidsmechanisme wordt automatisch geactiveerd.
- Werp de naald in een naaldencontainer.



Katheterstabilisatie

- Sluit een verlenglijn aan op de katheterhub en spoel eventueel de katheter.
- Fixeer de hub en de verlenglijn en plak vervolgens de intraveneuze katheter af met een transparante pleister waarbij de insteekopening altijd zichtbaar is.