

Instructie openen van de Prontosan® Fles:

1. Draai de blauwe dop van de fles
2. Verwijder de witte ring en gooi deze weg
3. Draai de blauwe dop weer op de fles
In de dop zit een pinnetje wat een gaatje prikt in de fles als je de dop aandraait.
4. Verwijder de dop en reinigen maar!



Openen van de Prontosan® Ampul:

Draai het kapje van de ampul om de ampul te openen.



Openen van de Prontosan® Tube:

Gebruik de dop om de originele zegel te verbreken.

Tip: Zet onderaan de fles op het etiket de datum van openen.
Na openen is Prontosan® 8 weken houdbaar.

