

# Softima® 3S

## Gebruikersinstructie

Een flexibel 2-delig kliksysteem met een uniek geïntegreerd geleidingssysteem voor eenvoudige en correcte plaatsing van het zakje op de huidplaat.

### Productomschrijving

- Een flexibele huidplaat met geleiding (sleutelgat) voor de juiste positionering en bevestiging van het zakje.
- Een opvangzakje met geïntegreerd geleidingstabje (sleutel) om gemakkelijk en correct het zakje op de huidplaat te bevestigen.

### Vorbereiding materiaal

- Knip de huidplaat op de juiste maat van de stoma. De huidplaat mag de stoma niet afklemmen! Knip de opening in de huidplaat daarom een fractie groter dan de stoma.

### Vorbereiding huid rondom de stoma

- Reinig de huid rondom de stoma met lauw water en droog de huid voorzichtig.
- Gebruik geen alcohol, ether of andere desinfecterende middelen!

### Aanbrengen van de huidplaat

- Verwijder de bescherm laag van de huidplaat.
- Plaats de huidplaat over de stoma en zorg ervoor dat de geleider (het sleutelgat) aan de onderkant zit.
- Plak de huidplaat vast door deze vanaf de stoma richting de buitenrand te wrijven.



### Aanbrengen van het zakje

- Schuif het tabje (de sleutel) van het zakje in de geleider (sleutelgat) van de flens. ❶
- Druk aan de onderkant de ring van het zakje vast op de ring van de huidplaat. Vervolgens de ringen vanaf de onderkant naar boven in elkaar drukken. ❷
- Klik de extra sluiting aan de bovenkant in elkaar.



### Verwijderen van het zakje

- Steun de huidplaat met de ene hand en trek met de andere hand (en met behulp van het lipje) het zakje van boven naar beneden van de huidplaat los.
- Verwijderen complete systeem: verwijder de huidplaat en het zakje als een geheel.

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 672 411 | [homecare.nl@bbraun.com](mailto:homecare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.