

Flow Collector

Gebruikersinstructie

Drainage opvangzak voor high output stomata. De Flow Collector is een extra opvangzak met een capaciteit van 2 liter.

Productomschrijving

- Deze opvangzak wordt gebruikt in combinatie met de bijbehorende stomazakjes voor extra opvangcapaciteit tijdens de nacht en/of bij hoge productie via de ileostoma. De Flow Collector is eenvoudig te koppelen aan de High Flow ileozakjes in de assortimenten van Softima® 1-delig, Softima® Key 2-delig, en Softima® 3S 2-delig.

Aanbrengen van de Flow Collector aan het stomazakje

- Pas de lengte van de slang aan de gewenste afmeting aan door deze in het zachte gedeelte door te knippen (knippen is elke 30 cm mogelijk). **A**
- Sluit de dop van de collector voordat u de aansluiting maakt met het stomazakje. **C**
- Zet de slang op de uitloop van het stomazakje, druk en draai het uiteinde van de slang over de uitloop van het stomazakje. **B**
- Loskoppelen na gebruik:
 - Draai en trek de slang rustig los van het stomazakje en sluit het stomazakje met de bijbehorende dop.
 - Een Flow Collector kan 72 uur gebruikt worden.

Let op: gebruik geen ontlastingsindickers in het stomazakje, dit kan verstopping van de slang veroorzaken.

N.B.: De schaalverdeling op de zijkant van de Flow Collector geeft een indicatie van de inhoud, voor een exacte meting adviseren wij het gebruik van een maatbeker.

Legen van de Flow Collector

- Om de collector te legen, legt u de zak op de rand van het toilet.
- Open de dop (houd deze tijdens het openen hoger dan de zak). **C**
- Houd de bovenzijde van de dop geklemd tussen duim en wijsvinger tijdens het legen. **D**
- Als u de Flow Collector wilt hergebruiken, spoel dan de zak en de dop schoon met water.

