



Vasofix[®] Safety


Gebruikersinstructie

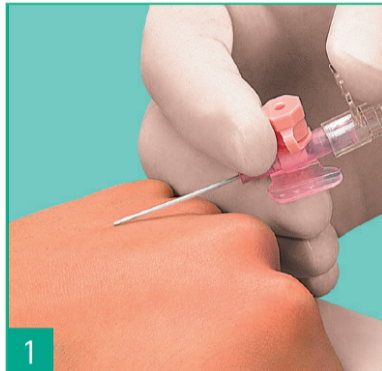


Desinfecteer voorafgaand aan de venapunctie de prikplaats volgens protocol en controleer de katheter. Begin met aanprikken onder een voor u gebruikelijke hoek tussen de 15 en de 35 graden.

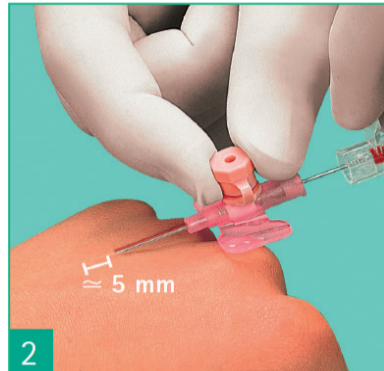

Voer de katheter op tot een flashback in de kamer optreedt. Voer na de flashback de volledige katheter 3-5 mm op. Trek de stalen naald 1 cm terug en houd daarbij de katheter op zijn plaats. Kijk naar de flashback in de canule en voer de katheter op in het bloedvat.

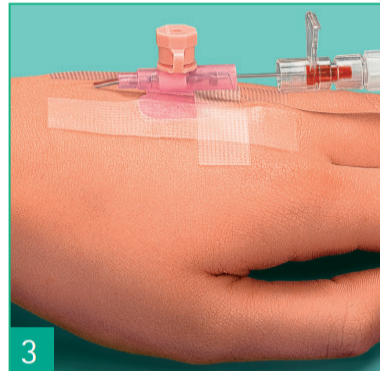

Zet de katheter vast op de huid met de naald nog op zijn plaats. Hierdoor wordt bloedverlies geminimaliseerd.

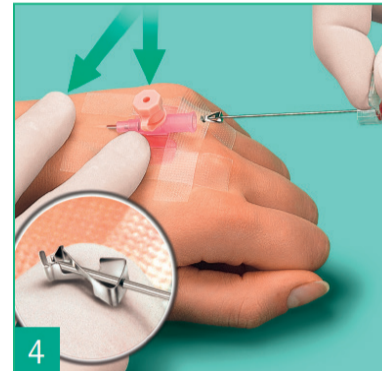


Ondersteun de aansluiting met de V-techniek en verwijder de naald. Nu wordt de passieve veiligheidsfunctie geactiveerd, waarbij de veiligheidsclip zich automatisch aan de bevel van de naald hecht.



Verbind de infuuslijn met de katheteraansluiting en bedek de prikplaats met steriel verband.



Sluit om een geneesmiddel te injecteren de injectiespuit met een korte draaibeweging aan op de geïntegreerde poort. De poort bevat een klep die zich automatisch opent en sluit en backflow voorkomt.

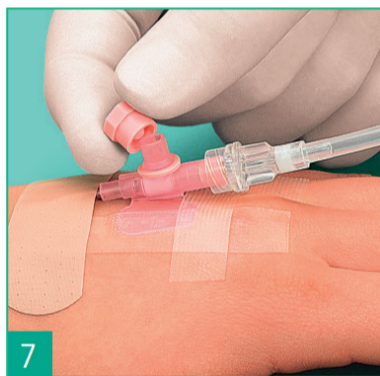

Sluit na de injectie onmiddellijk de beschermdop.

LET OP

- Makkelijk prikken onder een groot aantal hoeken
- Zelfactiverende cliptechnologie bedekt naaldpunt automatisch na gebruik
- Steek nooit een teruggetrokken naald terug in de katheter, de katheter kan beschadigen.
- Wanneer een succesvolle venapunctie uitblijft, verwijder dan eerst de naald waardoor het veiligheidsmechanisme zich activeert. Verwijder daarna de katheter.

