



B. BRAUN WIPES

GEBRUIKSAANWIJZING VULLEN



De dispensersystemen worden schoon geleverd. Ze hoeven dus niet van te voren gereinigd of gedesinfecteerd te worden. Vul alleen een volledig droge, gedesinfecteerde, schone en onbeschadigde dispenser. Indien de dispenser verontreinigd is adviseren we deze te desinfecteren (zie instructie volgende pagina). Draag handschoenen en een bril indien nodig.




Haal de fleecerol uit de verpakking en plaats deze in de dispenser. Trek de binnenste wipe eruit. Bereid de desinfecterende oplossing voor volgens de aanbevelingen van de fabrikant.



Giet de desinfecterende oplossing met cirkelvormige bewegingen van binnen naar buiten in de fleecerol zodat de doekjes gelijkmatig worden bevochtigd. De aanbevolen hoeveelheid desinfectiemiddel is aangegeven op het etiket van de dispenser. De fleecerol is volledig doorweekt na 10 minuten.



Trek de eerste wipe door de opening van de deksel van de dispenser. Druk het deksel stevig aan totdat deze vastklikt en gooi de eerste wipe weg. Sluit de veiligheidssluiting van het dispensersysteem. De dop is veilig gesloten wanneer een klik hoorbaar is.

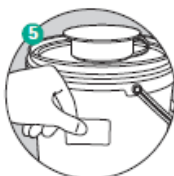

Vul het etiket volledig in en plak het goed zichtbaar op de B. Braun dispenser. De houdbaarheid bij gebruik van de geïmpregneerde wipes is maximaal 28 dagen.

GEBRUIKSAANWIJZING NAVULLEN EN HERGEBRUIKEN

Het dispensersysteem kan opnieuw worden gevuld en hergebruikt als de laatste wipe is gebruikt of wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voordat het dispensersysteem opnieuw gevuld kan worden moet het gereinigd (met heet water van 55 tot 60 °C of met een doekje dat verzadigd is met een geschikt reinigingsmiddel) en gedesinfecteerd worden (inclusief het deksel en de opening). Als alternatief kan een automatische reiniging en desinfectie worden uitgevoerd. Wij raden aan voor het navullen en hergebruik van het B. Braun dispensersysteem de handmatige reiniging en desinfectie als hieronder beschreven uit te voeren.



1 Draag handschoenen en veiligheidsbril indien noodzakelijk.



2 Om het dispensersysteem op de juiste manier schoon te maken, gooit u de resterende wipes en desinfectansresten weg. Veeg alle oppervlakken (inclusief de emmer, deksel en de opening) schoon met een geschikt, in een alcoholisch desinfectiemiddel gedrenkt of vooraf geïmpregneerd, non-woven doekje.



3 Vóór de desinfectie moet het dispensersysteem droog en visueel schoon zijn. Voor het desinfecteren van alle oppervlakken (inclusief de emmer, deksel en de opening) neem een geschikt, in een alcoholisch desinfectiemiddel gedrenkt of vooraf geïmpregneerd, non-woven doekje. De blootstellingstijd van het desinfectiemiddel moet in acht worden genomen.



4 Laat ten slotte alle onderdelen volledig drogen voordat ze opnieuw worden gebruikt. Vervolgens kan het dispensersysteem opnieuw worden bijgevoerd zoals beschreven op de vorige pagina.