



Ureofix[®] 500 Classic

Gebruiksaanwijzing


1. BEVESTIG HET SYSTEEM EN SLUIT DEZE AAN OP DE BLAASKATHETER

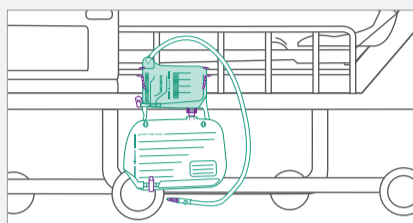


Bevestig het systeem verticaal aan het bed, zonder contact met de vloer te maken. Zorg dat het systeem onder het niveau van de blaas hangt.

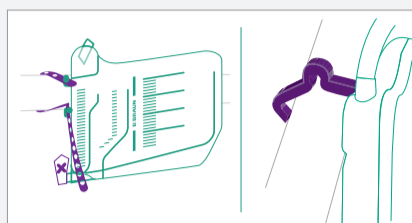

Gebruik de 2 geperforeerde banden of de haak.

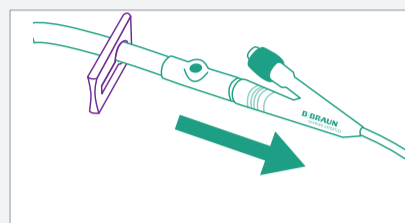


Sluit de drainageslang aan op de blaaskatheter.

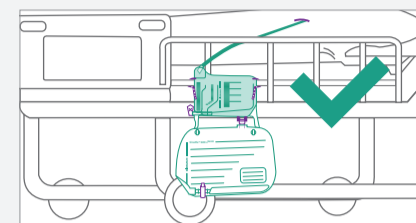


Laat de slang met een constante helling tussen de patiënt en het apparaat dalen.


2. LEES DE MAAT EN LEEG DE MEETKAMER

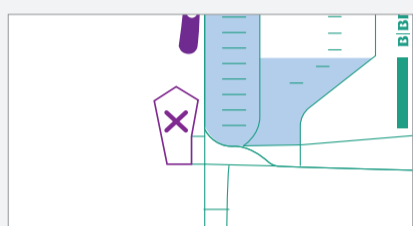

Meet elk uur de urineproductie door op de schaal van de meetkamer het peil af te lezen.

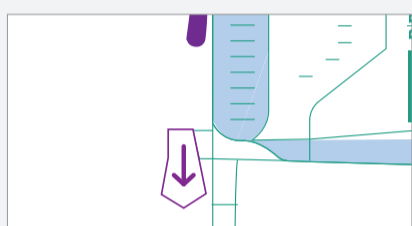


Om de meetkamer te legen, draai de kraan aan de onderkant open. Positie 'pijl' is zichtbaar.

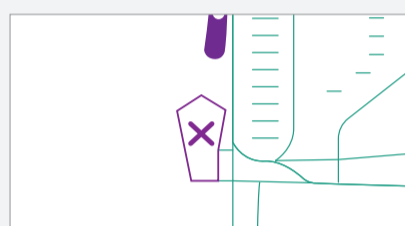


Om, indien gewenst, een nieuwe cyclus te starten, wordt de kraan teruggedraaid. Positie 'X' is zichtbaar.


3. AFNAME VAN URINEMONSTERS

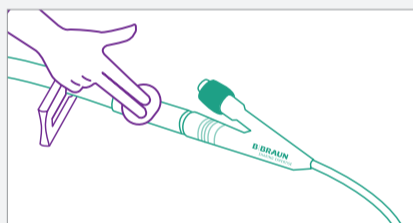


Reinig en ontsmet het membraan.

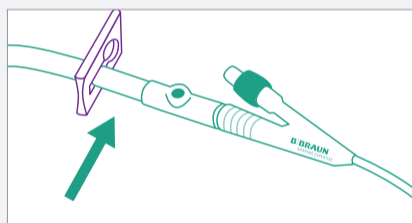

Sluit de schuifklem op de slang. Koppel de blaaskatheter niet los.

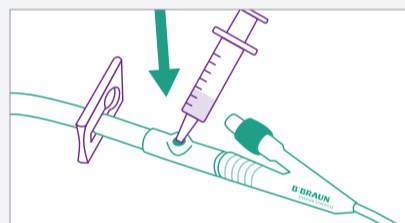


Zuig urine op met een aspiratiespuit via de afnamepoort.

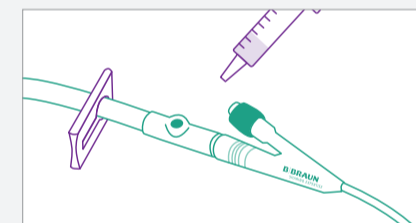


Open de schuifklem op de slang.


4. URINEZAK LEGEN OF VERVANGEN

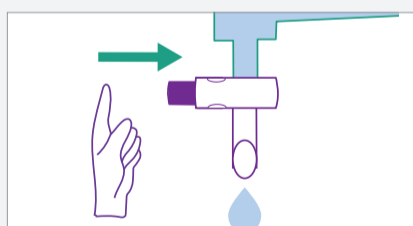


De urinezak wordt geleegd via de kruiskraan indien nodig.

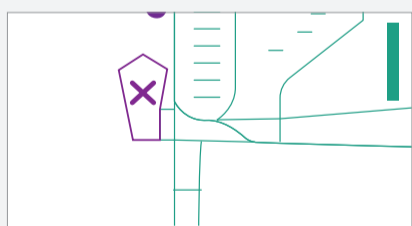

Gesloten zakken van 1,5 en 3,5 liter moeten vervangen worden. Om de zak te vervangen moet de kraan gesloten zijn (positie 'X' zichtbaar).

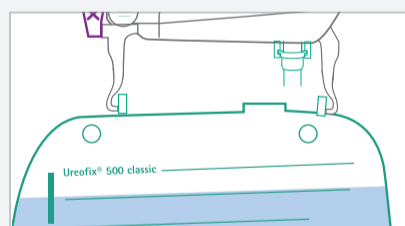

Maak de urinezak los van de meetkamer en maak hem leeg door deze langs de geperforeerde lijn open te scheuren.

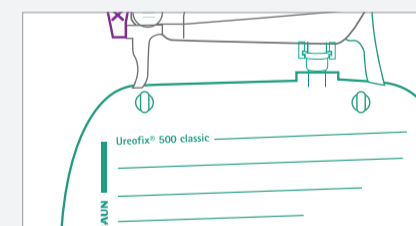


Sluit een nieuwe urinezak aan op de meetkamer.


5. PATIËNT VERPLAATSEN




Wanneer een patiënt naar een ander bed wordt verplaatst, leeg de meetkamer volledig.

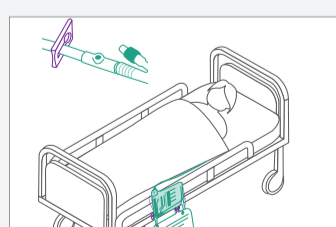


Sluit de schuifklem op de slang.

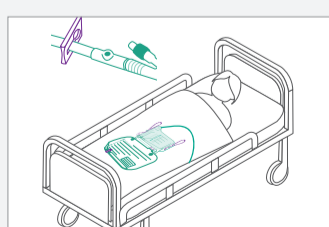

Leg het systeem plat op de achterkant.

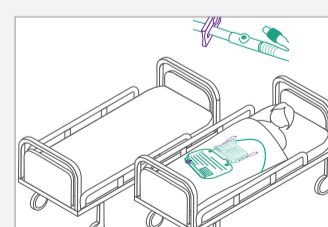

Verplaats de patiënt.

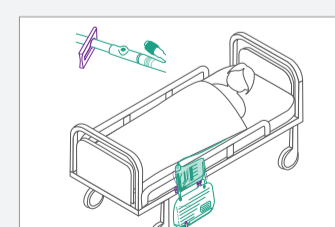

Breng het systeem onmiddellijk terug in verticale positie en heropen de schuifklem.